



Mobilní aplikace eVito v zařízeních s operačním systémem Android bez integrované ANT+ technologie

Mobilní aplikace eVito je ZDARMA a můžete ji využít k:

- 1) Registraci do účtu eVito Lite
- 2) Monitorování sportovních aktivit – sport tracking
- 3) Přehledu o záznamech v eVito systému – historie měření, aktivit
- 4) Přenosům měření z eVito zařízení

Popis aplikace: eVito aplikace umožňuje monitorovat pohybové aktivity, zobrazovat naměřené hodnoty přímo v telefonu a pokud je mobilní telefon vybaven technologií ANT+ (případně zvládne USB Host mód – viz. dále), tak i komunikovat s měřicími zařízeními a data z nich přenášet do systému eVito. ANT+ modul umožňuje při sportovních aktivitách pomocí hrudního pásu sledovat tep a upřesní výpočet spálených kalorií.

Rychlonávod jak zprovoznit bezdrátové přenosy z eVito zařízení v aplikaci eVito u telefonů/tabletů s operačním systémem Android:


1. Otevřete v telefonu/tabletu Google Play
 - a. Stáhněte si aplikaci eVito 
 - b. Stáhněte si aplikace ANT+ Radio Service 
 - c. Stáhněte si aplikaci ANT+ USB Service 
2. Spusťte aplikaci eVito
 - a. Přihlaste se (zaregistrujte se)
 - b. Klikněte na záložku Menu/Nastavení a zaklikněte Zapnutí ANT+
3. Klikněte na záložku LOG
4. Připojte OTG kabel s ANT+ USB
5. Potvrďte, že aplikace může využívat ANT+
6. V LOGu se zobrazí informace ANT+ připojen a nyní je aplikace připravena pro bezdrátové přenosy měření z eVito zařízení do vašeho účtu v eVito systému aktivního zdraví 😊

Podrobný návod jak zprovoznit bezdrátové přenosy z eVito zařízení v aplikaci eVito u telefonů/tabletů s operačním systémem Android:

1. Instalace eVito aplikace

1. Stáhněte si eVito aplikaci do svého mobilního telefonu prostřednictvím Google Play na adrese:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.kaktus.eVito>

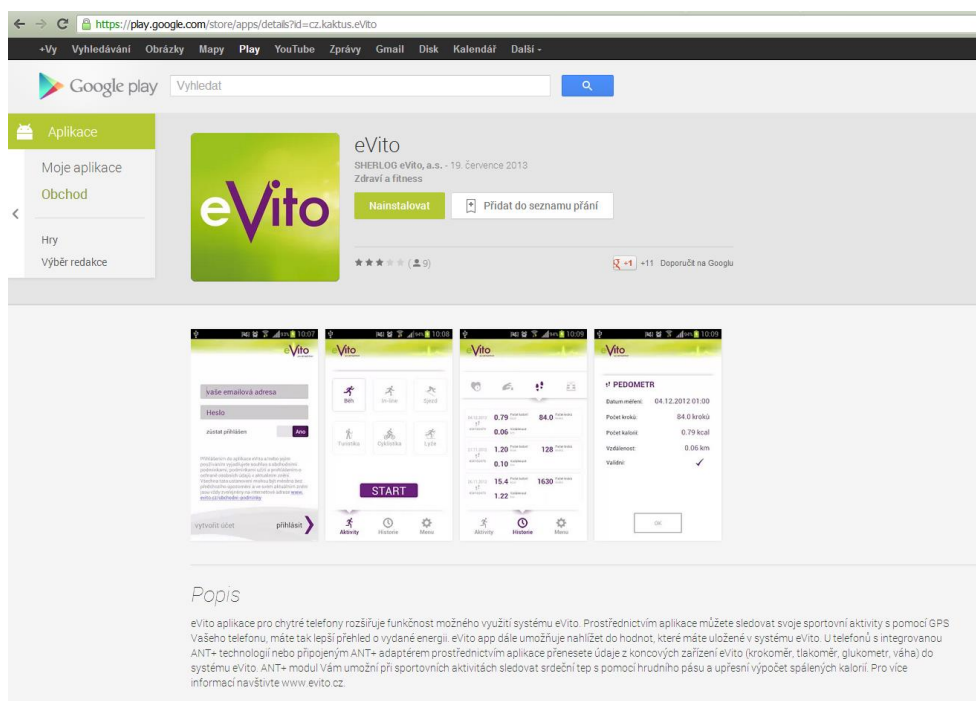

eVito
SHERLOG eVito, a.s. · 19. července 2013
Zdraví a fitness

Nainstalovat Přidat do seznamu přání

★★★★☆ (5)

11 Doporučit na Googlu

Popis

eVito aplikace pro chytré telefony rozšiřuje funkčnost možného využití systému eVito. Prostřednictvím aplikace můžete sledovat svoje sportovní aktivity s pomocí GPS Vašeho telefonu, máte tak lepší přehled o vydané energii. eVito app dále umožňuje nahlížet do hodnot, které máte uložené v systému eVito. U telefonů s integrovanou ANT+ technologií nebo připojeným ANT+ adaptérem prostřednictvím aplikace přenesete údaje z koncových zařízení eVito (krokometr, tlakoměr, glukometr, váha) do systému eVito. ANT+ modul Vám umožní při sportovních aktivitách sledovat srdeční tep s pomocí hrudního pásu a upřesní výpočet spálených kalorií. Pro více informací navštivte www.evito.cz.

2. Přihlaste se do aplikace prostřednictvím vašich přihlašovacích údajů, případně na úvodní stránce vlevo dole zvolte „Vytvořit účet“. Po přihlášení proběhne synchronizace dat z vašeho eVito účtu. Než se vám v účtu zobrazí historie posledních 30 dní (kapacita aplikace), projděte si nastavení aplikace – záložka Menu/Nastavení.

3. Nastavení aplikace:

Aplikace Vám umožňuje nastavit:

- jednotky (vzdálenosti, rychlosti, energie, glukózy, zobrazení váhy)
- úsporu GPS (šetří baterii, na úkor přesnosti trackování aktivit)

- zaslání tepové frekvence (prostřednictvím hrudního pásu)
- povolení pauzy (Možné zvolit Pauzu v rámci běžící sportovní aktivity)
- synchronizace (kalendář, trasy, měření, **perioda – perioda synchronizace mobilní aplikace s eVito účtem je stanovena na 15 min. z důvodu úspory baterie doporučujeme nastavit delší intervaly – 6/12 hod. – nemá vliv na přenosy z mobilní aplikace a trackování sportovních aktivit!!!**)
- **zapnutí ANT+ (pokud chcete realizovat přenosy prostřednictvím mobilní, používat hrudní pás apod., zaškrtněte!)**
- párování hrudního pásu (kódovaný přenos dat z hrudního pásu přímo do vaší aplikace)
- Dostupná zařízení (přehled zařízení, které používáte)
- Odeslat log k diagnostice (odešlete v případě, že v aplikaci dojde k zásadnímu problém ovlivňujícímu její funkčnost)

Podmínky fungování bezdrátových přenosů z eVito měřících zařízení prostřednictvím mobilních telefonů nebo tabletů:

1. Mobilní zařízení je USB Host (USB Host mód je podporován od Androidu 3.1) – umožňuje připojení různá USB zařízení – disky, klávesnice, myši...
2. USB kabel s funkcí USB On-The-Go, se kterým jednoduše připojíte různá USB zařízení, aniž by bylo nutné jakkoli připojit telefon k počítači



3. ANT+ USB stick , USB ANT+ mini




2. Stažení ovladačů ANT+

1. Na Google Play si stáhněte ovladače k ANT+:



a. ANT+ Radio Service:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dsi.ant.service.socket&hl=cs>

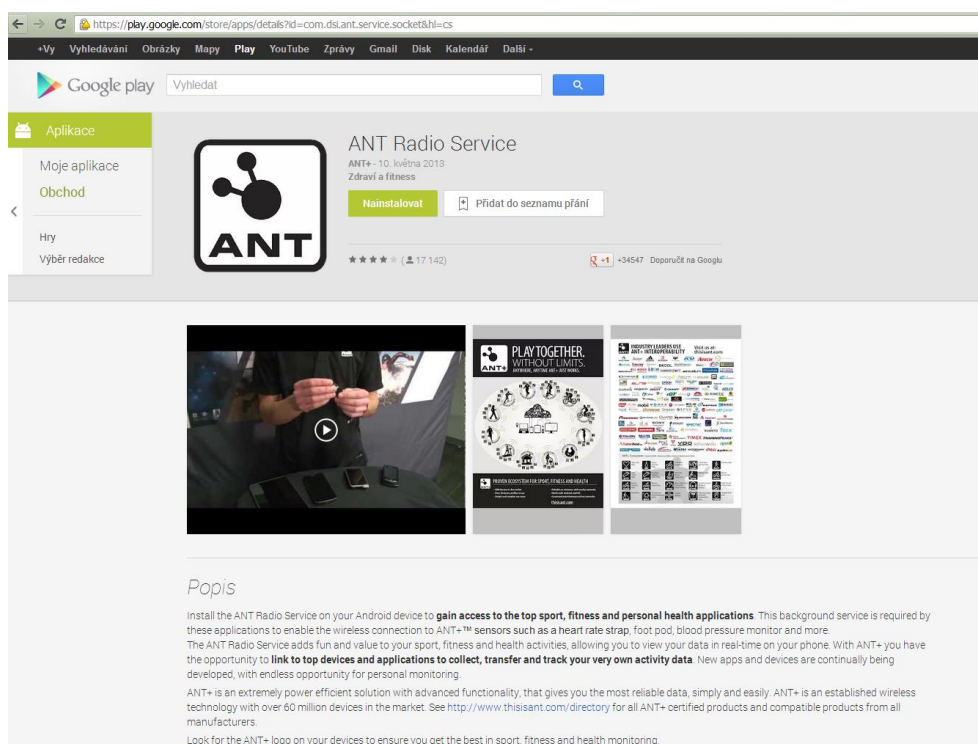

The screenshot shows the Google Play Store page for the 'ANT Radio Service' app. The app is developed by 'ANT+' and was updated on '10. května 2013'. It is categorized under 'Zdraví a fitness'. The page features a green 'Nainstalovat' (Install) button and a 'Přidat do seznamu přání' (Add to wishlist) button. The app has a 4.5-star rating based on 17,142 reviews and has been recommended by 43,547 users on Google. Below the app information, there are three preview images: a person using a device, a diagram titled 'PLAY TOGETHER. WITHOUT LIMITS.', and a list of compatible devices and sensors.

Popis

Install the ANT Radio Service on your Android device to **gain access to the top sport, fitness and personal health applications**. This background service is required by these applications to enable the wireless connection to ANT+™ sensors such as a heart rate strap, foot pod, blood pressure monitor and more.


The ANT Radio Service adds fun and value to your sport, fitness and health activities, allowing you to view your data in real-time on your phone. With ANT+ you have the opportunity to **link to top devices and applications to collect, transfer and track your very own activity data**. New apps and devices are continually being developed, with endless opportunity for personal monitoring.

ANT+ is an extremely power efficient solution with advanced functionality, that gives you the most reliable data, simply and easily. ANT+ is an established wireless technology with over 60 million devices in the market. See <http://www.thisisant.com/directory> for all ANT+ certified products and compatible products from all manufacturers.

Look for the ANT+ logo on your devices to ensure you get the best in sport, fitness and health monitoring.

b. ANT+ USB Service:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dsi.ant.usbservice&hl=cs>

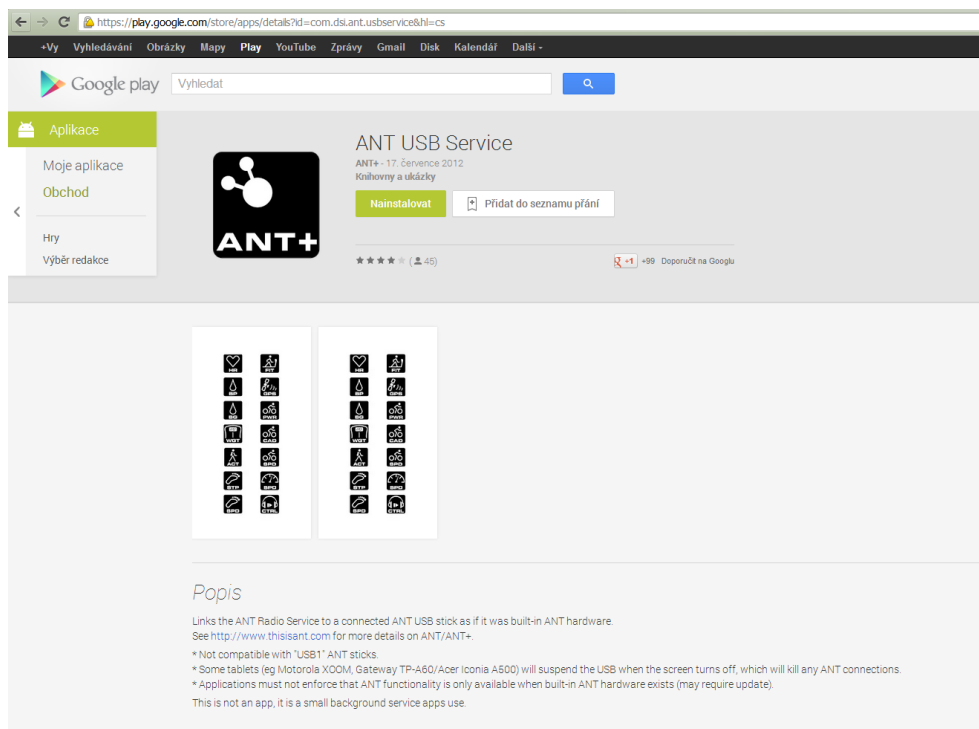



2. Připojte ANT+ USB k telefonu/tabletu a potvrďte

(eVito aplikace je spuštěná, v Menu/Nastavení je zakliknuto „Zapnutí ANT+“)




Po zapojení USB se Vám otevře okno s otázkou „Při připojení zařízení USB otevřít ANT+ USB Service?“ a **klikněte na OK.**

V záložce LOG se objeví informace ANT+ připojen a nyní je vše připraveno k provedení měření – realizaci přenosů z eVito bezdrátových zařízení.

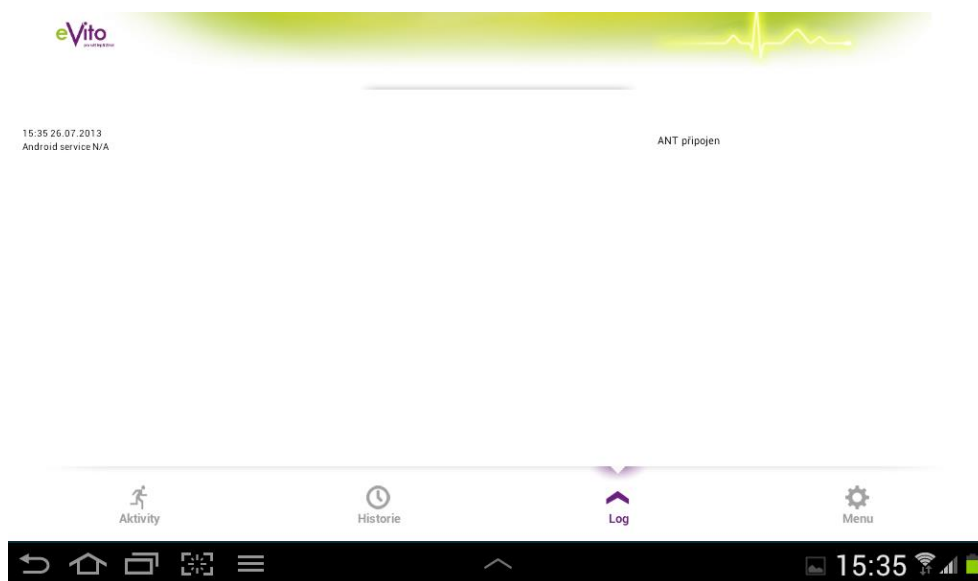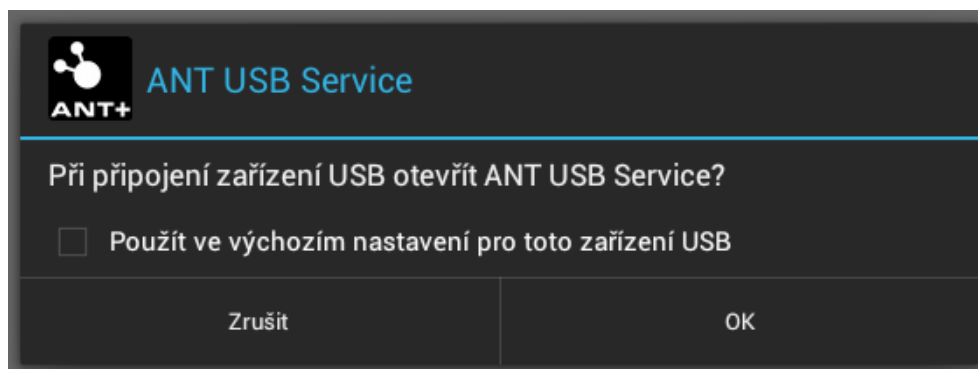

(Pokud se neotevře, odpojte a znovu připojte ANT+ USB stick, prověřte, jestli splňujete Podmínky fungování viz. výše event. kontaktujte nás na podpora@evito.cz)

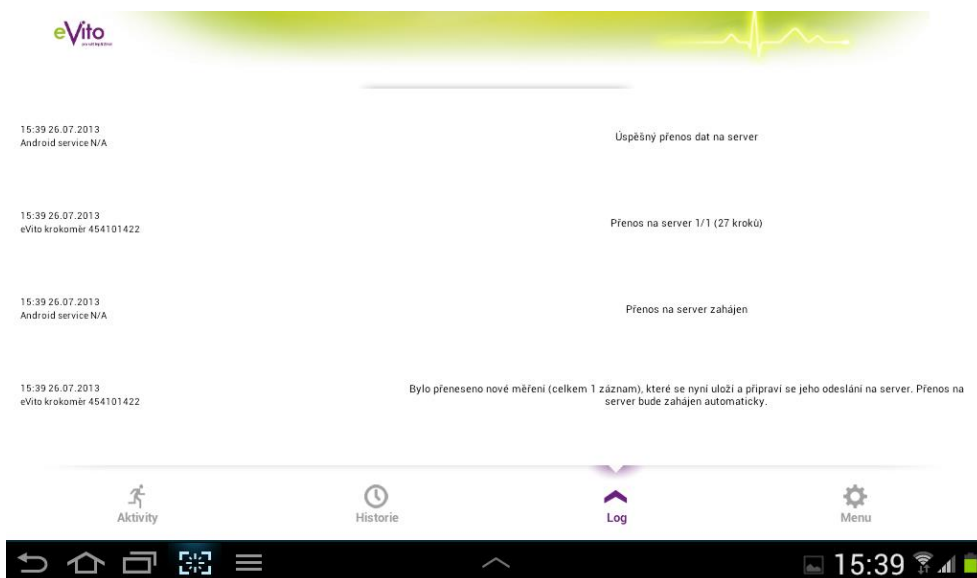

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailu
podpora@evito.cz