

Návod na instalaci programu eVito Win Service

USB ANT+



je zařízení určené pro přenos naměřených hodnot prostřednictvím PC. Zajišťuje komunikaci ve chvíli, kdy je vloženo do USB slotu v počítači. Podmínkou pro funkčnost zařízení USB ANT+ je nainstalování a následné spuštění programu **eVito Win Service**, který stáhnete a nainstalujete z následujícího odkazu: www.evito.cz/downloads Po nainstalování dle instrukcí se program spustí a jeho ikona se zobrazí na ploše počítače. V kontrolním okně služby můžete kdykoliv sledovat, jestli je USB ANT+ zařízení připojeno.

Instalace programu eVito Win Service


- 1) V internetovém prohlížeči otevřete webovou stránku: www.evito.cz/downloads




The screenshot shows the eVito website's download page. The header includes the eVito logo, a search bar, and navigation tabs: 'Poznej eVito', 'Zařízení', 'Chci eVito', and 'Podpora'. The main content is divided into two columns. The left column, 'Stahování ovladačů', features two items: 'eVito Win Service (verze 1.0.75)' and 'USB ANT+ ovladače'. The right column, 'Manuály ke stažení', lists several manuals such as 'Uživatelská příručka k systému eVito' and 'Nastavení programu eVito Win Service'. The footer contains contact information, social media links, and logos for 'Green Secar Bohemia Group' and 'SHERLOG'.

- 2) Klikněte na první odkaz: **eVito Win Service**, který odkazuje na soubor obsahující program **eVito Win Service**. Program se stáhne do vašeho počítače do složky Stažené soubory, pokud nemáte nastaveno jinak. Program je komprimován do formátu .zip. Před instalací jej nejprve extrahujte – rozbalte do nové složky.


- 3) Otevřete složku s extrahovanými soubory a klikněte na soubor „Instalace eVito Win Service“. Přehledný průvodce vás provede celou instalací služby:

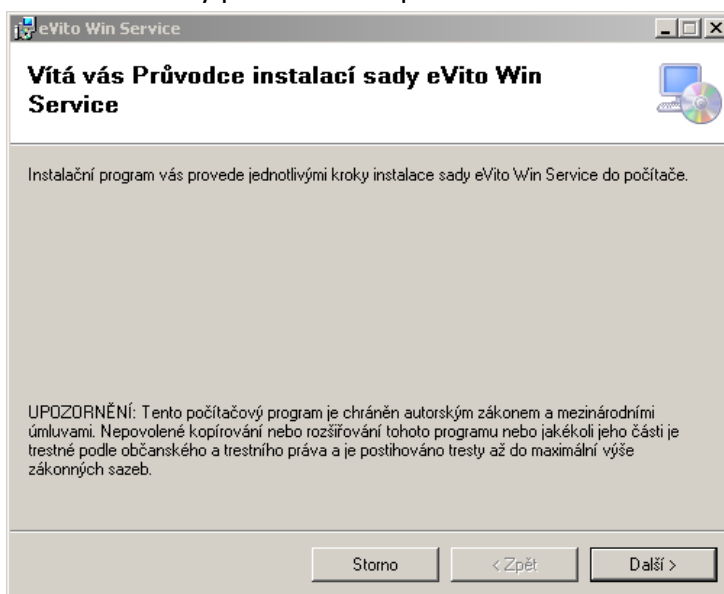


- 4) Průvodce vám automaticky nabízí místo pro uložení programu – klikněte na „Další >“

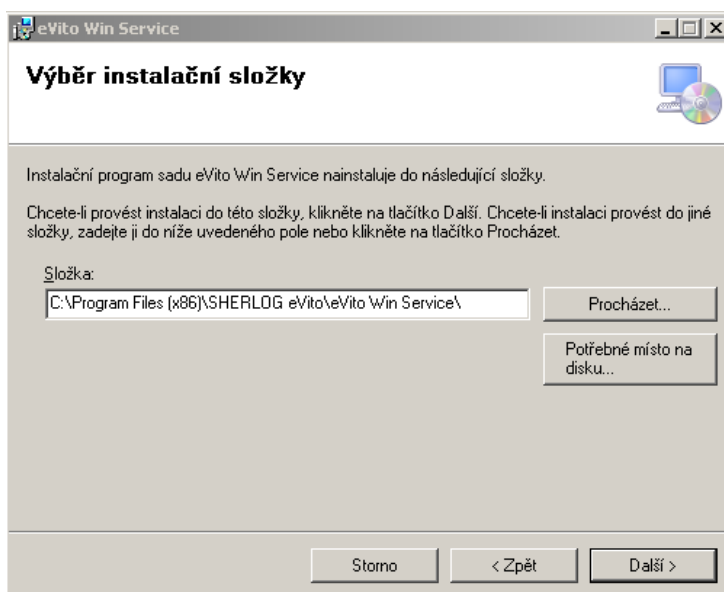


5) Potvrďte instalaci opět přes tlačítko „DALŠÍ >“

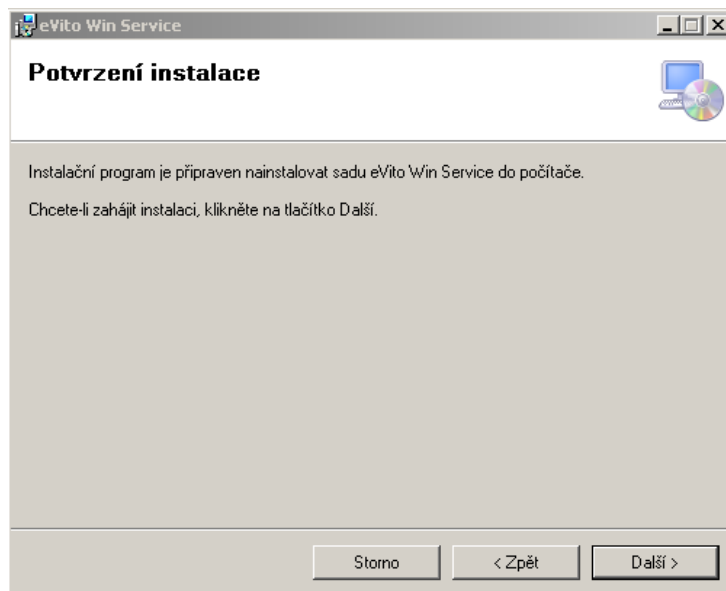


6) Samotná instalace může trvat několik minut. Vyčkejte prosím na další pokyn programu, který se týká připojení přes Proxy server.

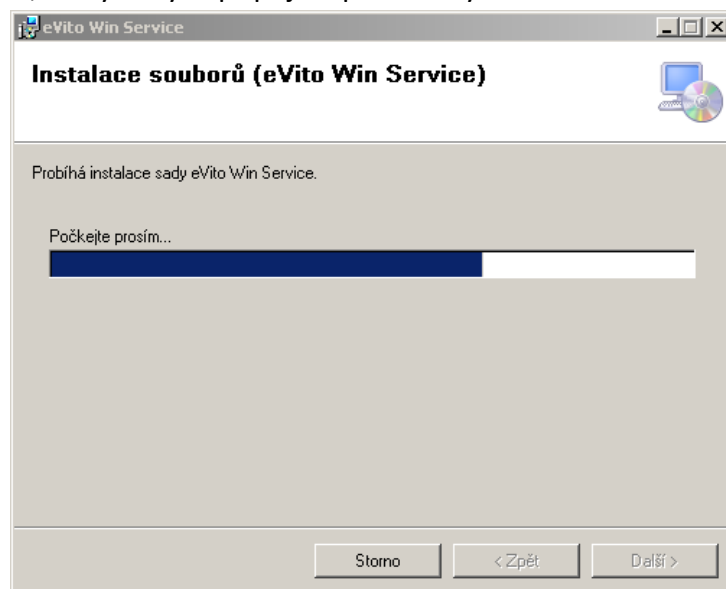


- 7) Pokračujeme v instalaci. Program eVito Win Service se vás zeptá na připojení přes Proxy server. Pokud jste připojeni přes Proxy, automaticky vyplní IP adresu. Pokud nejste připojeni přes Proxy server, ponechejte zaškrtnuté „No Proxy“ a stiskněte tlačítko „Pokračovat“

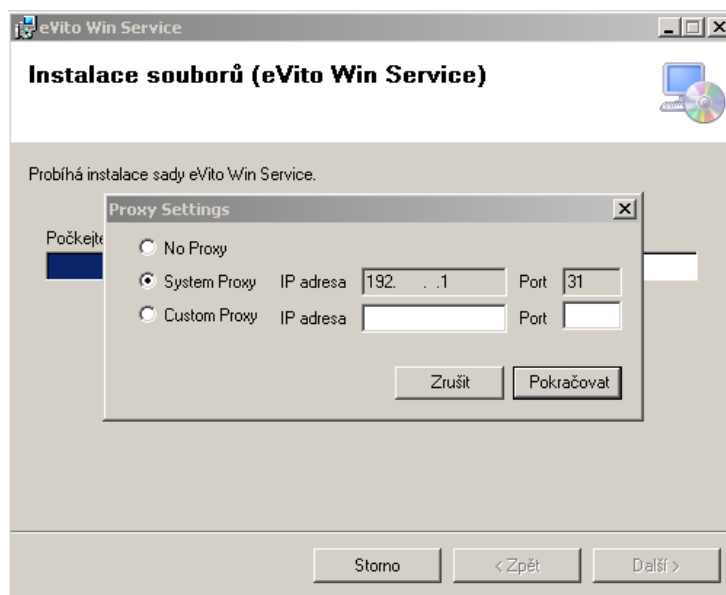

- 8) Nyní jste na svůj počítač úspěšně nainstalovali **eVito Win Service**, klikněte na tlačítko „Zavřít“.

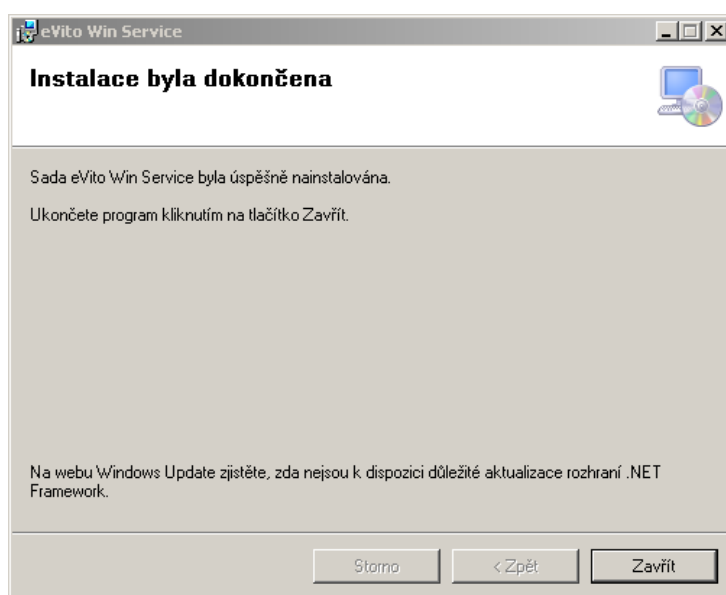

- 9) Vyčkejte prosím na další pokyn programu, který se týká registrace služby. Registrace služby provede spárování eVito Win Service s vaším uživatelským účtem. Pokud máte v rodině více uživatelů služby eVito, je nutné provést registraci programu ke každému uživatelskému účtu. Poté klikněte na tlačítko „Registrovat“.

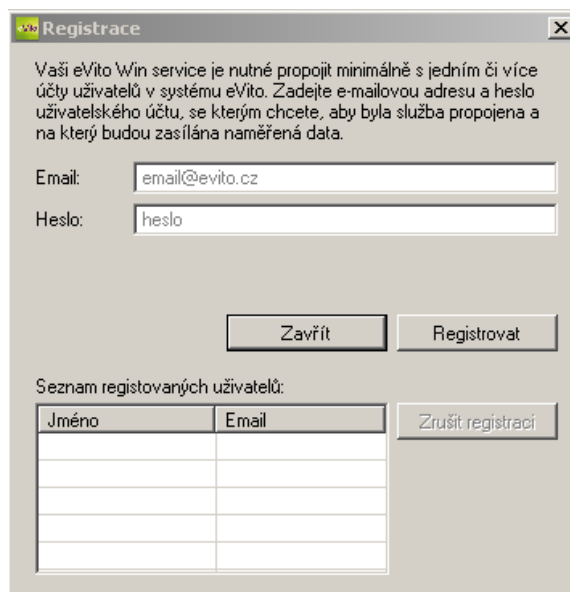

Vaši eVito Win service je nutné propojit minimálně s jedním či více účty uživatelů v systému eVito. Zadejte e-mailovou adresu a heslo uživatelského účtu, se kterým chcete, aby byla služba propojena a na který budou zasílána naměřená data.


Email:

Heslo:


Seznam registrovaných uživatelů:

Jméno	Email

V pravém dolním rohu počítače na stavovém řádku se vám zobrazí ikona aplikace s informací, že služba v pořádku běží.

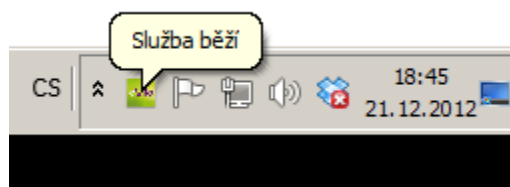


10) Dvojitým kliknutím na ikonu se vám zobrazí stavové okno programu.

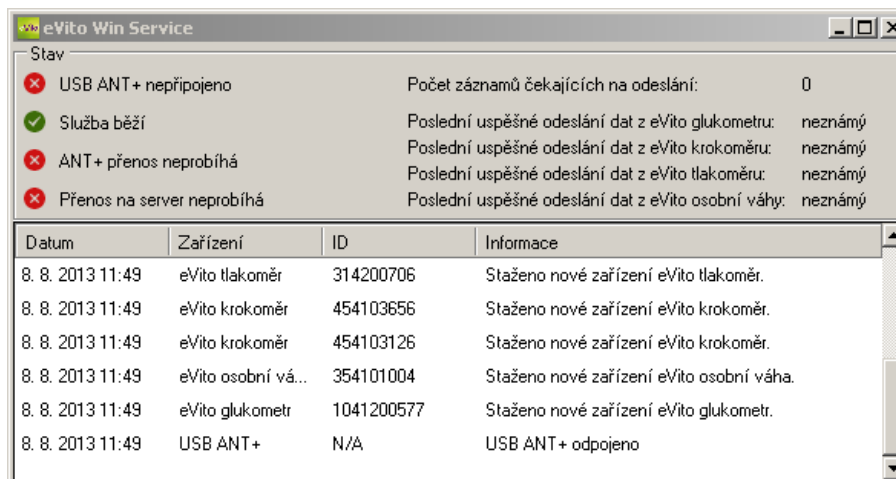


Datum	Zařízení	ID	Informace
8. 8. 2013 11:49	eVito tlakoměr	314200706	Staženo nové zařízení eVito tlakoměr.
8. 8. 2013 11:49	eVito krokoměr	454103656	Staženo nové zařízení eVito krokoměr.
8. 8. 2013 11:49	eVito krokoměr	454103126	Staženo nové zařízení eVito krokoměr.
8. 8. 2013 11:49	eVito osobní vá...	354101004	Staženo nové zařízení eVito osobní váha.
8. 8. 2013 11:49	eVito glukometr	1041200577	Staženo nové zařízení eVito glukometr.
8. 8. 2013 11:49	USB ANT+	N/A	USB ANT+ odpojeno

11) Zelené ikony vám signalizují fungující procesy, červené ikony s křížkem signalizují neprobíhající procesy. Nyní připojte USB ANT+ a proveďte první měření nebo přenos naměřených hodnot. Ve stavovém poli uvidíte informace o probíhajících přenosech.

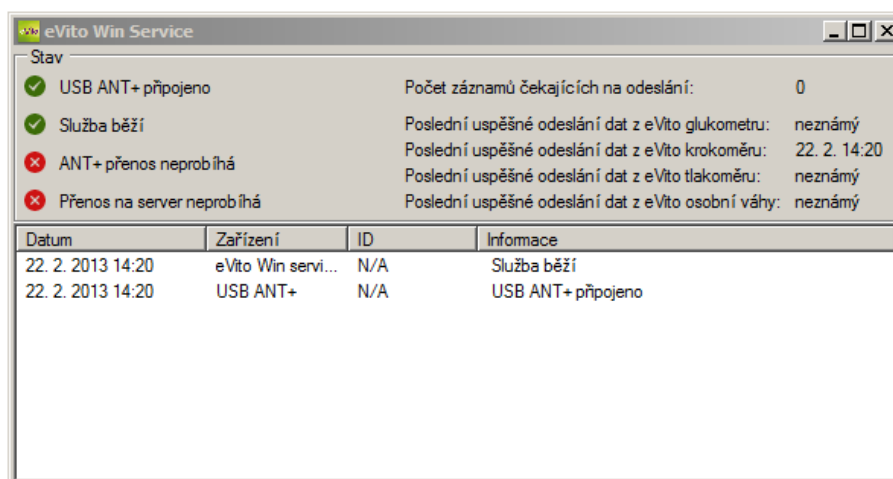


Datum	Zařízení	ID	Informace
22. 2. 2013 14:20	eVito Win servi...	N/A	Služba běží
22. 2. 2013 14:20	USB ANT+	N/A	USB ANT+ připojeno

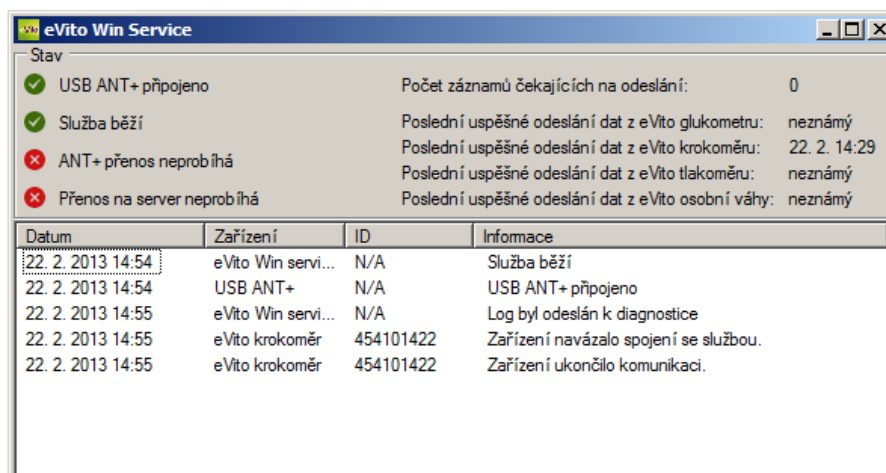

Datum	Zařízení	ID	Informace
22. 2. 2013 14:54	eVito Win servi...	N/A	Služba běží
22. 2. 2013 14:54	USB ANT+	N/A	USB ANT+ připojeno
22. 2. 2013 14:55	eVito Win servi...	N/A	Log byl odeslán k diagnostice
22. 2. 2013 14:55	eVito krokoměr	454101422	Zařízení navázalo spojení se službou.
22. 2. 2013 14:55	eVito krokoměr	454101422	Zařízení ukončilo komunikaci.

Důležité informace:

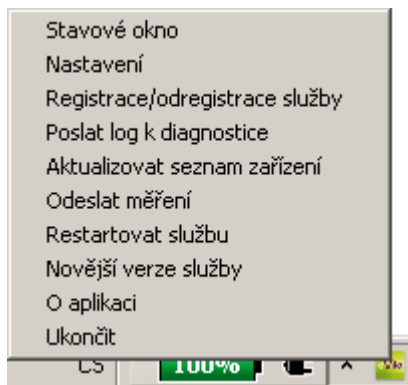

Kliknutím pravým tlačítkem myši na ikonu služby na stavovém řádku máte možnost kontrolovat program **eVito Win Service**:

Stavové okno – otevře program **eVito Win Service**.

Nastavení – zde volíte „Automatické odeslání logu k diagnostice“ (log – záznam, který způsobí problémové chování aplikace se odešle vývojářům

služby), „Autostart“ (aplikace se automaticky spustí při zapnutí počítače), „Automaticky zobrazit stavové okno“ (automatické zobrazení **eVito Win Service**).

Registrace služby/odregistrace služby – v případě, že službu bude využívat více uživatelů, klikněte na „Registraci služby“ a spárujete s dalším uživatelským účtem (viz. výše).

Poslat log k diagnostice – v případě, že program data nepřenáší jak má nebo se chová nestandardně, máte možnost odeslat „log“ k diagnostice vývojářům programu – log se odešle automaticky a o jeho odeslání obdržíte informaci ve stavovém okně programu.

Aktualizovat seznam zařízení – v případě, že registrujete k programu více uživatelů, vždy po registraci nového uživatele klikněte na toto tlačítko. Program „načte“ seznam nových zařízení, ze kterých má provádět přenosy do vašich uživatelských účtů.

Odeslat měření - v pravém horním rohu naleznete informaci o „Počtu záznamů čekajících na odeslání“, které se budou odesílat na server. Pokud by se stalo, že program ukončí komunikaci se zařízením a záznamy se samy během minuty neodešlou, klikněte na „odeslat měření“ a data se vám začnou přenášet do vašeho uživatelského profilu.

Restartovat službu – v případě problémů restartujte svou službu.

Novější verze služby – vás informuje o nové verzi programu.

O aplikaci – informace o verzi aplikace.

Ukončit – ukončí program **eVito Win Service**.



Při jakémkoliv problému s přenášením záznamů program **eVito Win Service** restartujte. Pokud se vám problém nepodaří vyřešit, kontaktujte **Zákaznickou podporu** buď prostřednictvím formuláře na webových stránkách <http://www.evito.cz/Podpora/Default.aspx> nebo prostřednictvím emailu: podpora@evito.cz