


Návod na instalaci ovladačů pro ANT+ USB stick

1. Stažení ovladačů
2. Instalace ovladačů

1. Stažení ovladačů. Ovladače (drivery) pro ANT+ USB stick využijete ve chvíli, kdy máte k počítači připojený ANT+ USB stick a v programu eVito Win Service svítí **červená** ikona USB ANT+ nepřipojeno.

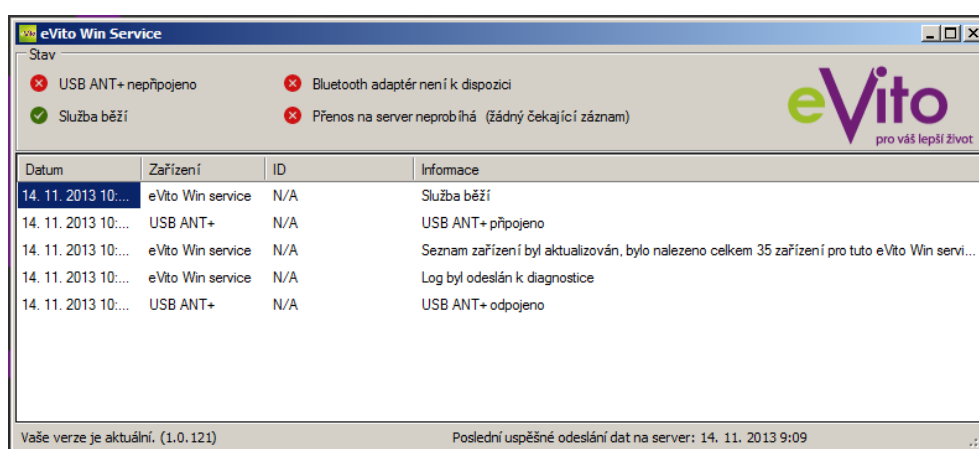

Ovladače jsou zdarma dostupné na webové stránce www.evito.cz vpravo nahoře v menu Podpora – Stažení ovladačů:




Ovladače naleznete pod druhým odkazem – „USB ANT+ ovladače“ - klikněte na nadpis a ovladače se stáhnou do vašeho počítače jako .zip (komprimovaný soubor).



The screenshot shows the eVito website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Poznej eVito', 'Zařízení', 'eshop', and 'Podpora'. Below this, the 'Stahování ovladačů' (Download drivers) section is visible. It contains three main items:

- eVito Win Service (verze 1.0.121)**: Jedná se o program/službu pro prostředí MS Windows, prostřednictvím které je možné přenášet hodnoty z koncových zařízení do systému eVito. Pro přenos prostřednictvím služby musí být k počítači připojen USB ANT+ adaptér.
- USB ANT+ ovladače**: Zde jsou ovladače pro USB ANT+ adaptér pro operační systém Windows, který je může při prvním použití tohoto zařízení vyžadovat. (This link is highlighted with a red box in the image.)
- eVito Mac Service (verze 1.0.021)**: Jedná se o program/službu pro prostředí Mac OS X, prostřednictvím které je možné přenášet hodnoty z koncových zařízení do systému eVito. Pro přenos prostřednictvím služby musí být k počítači připojen USB ANT+ adaptér.

To the right, there is a 'Manuály ke stažení' (Download manuals) section with several links for user guides and settings for various devices like the glucose meter and blood pressure monitor.


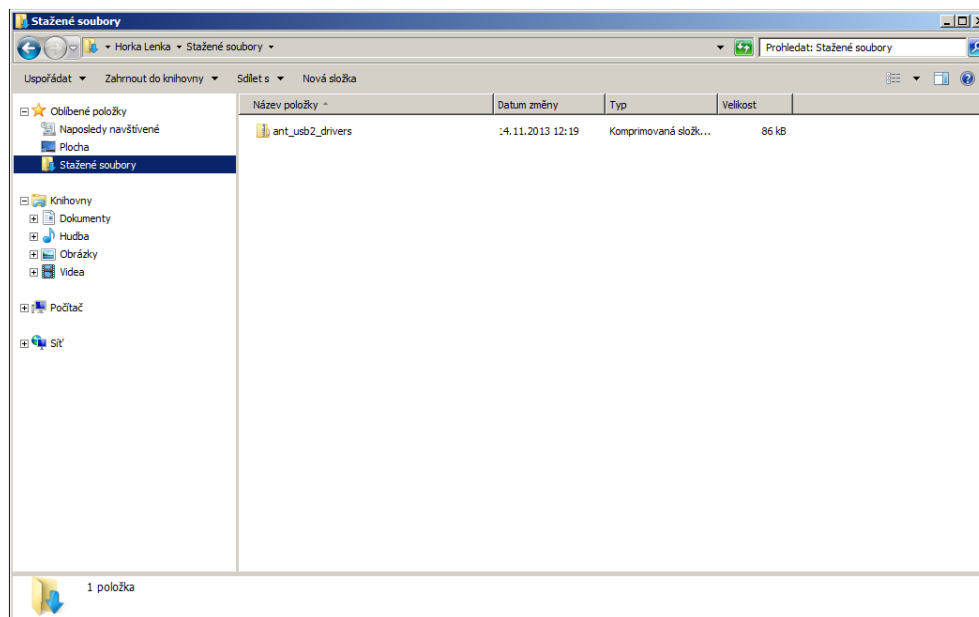



The screenshot shows a Windows File Explorer window titled 'Stážené soubory'. The address bar shows the path 'Horka Lenka > Stážené soubory'. The main pane displays a table of files:

Název položky	Datum změny	Typ	Velikost
ant_usb2_drivers	:4.11.2013 12:19	Komprimovaná složk...	86 kB

The status bar at the bottom indicates '1 položka' (1 item).


Dvakrát klikněte na název složky a Extrahujte soubory do složky nové.

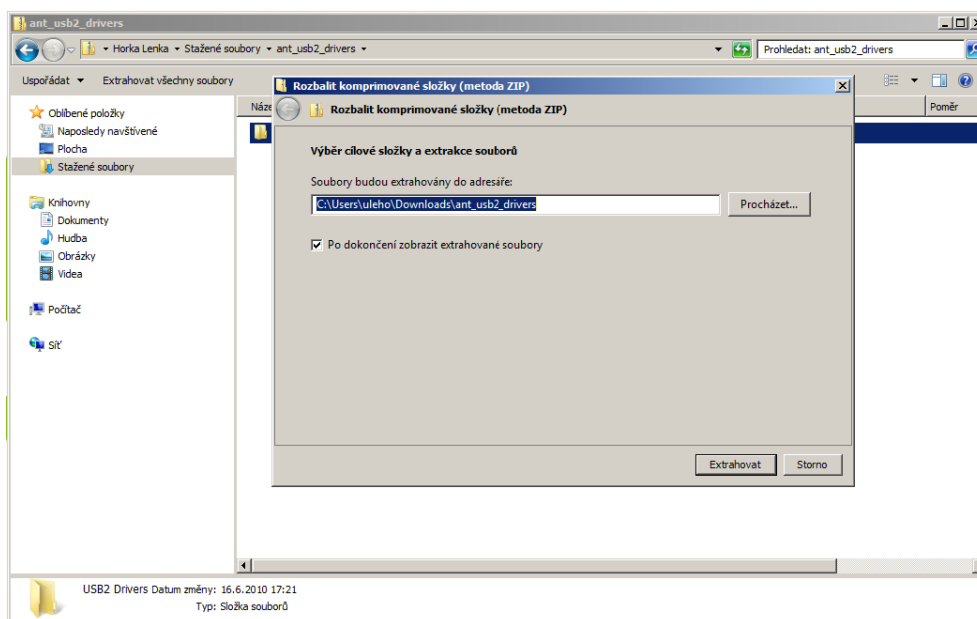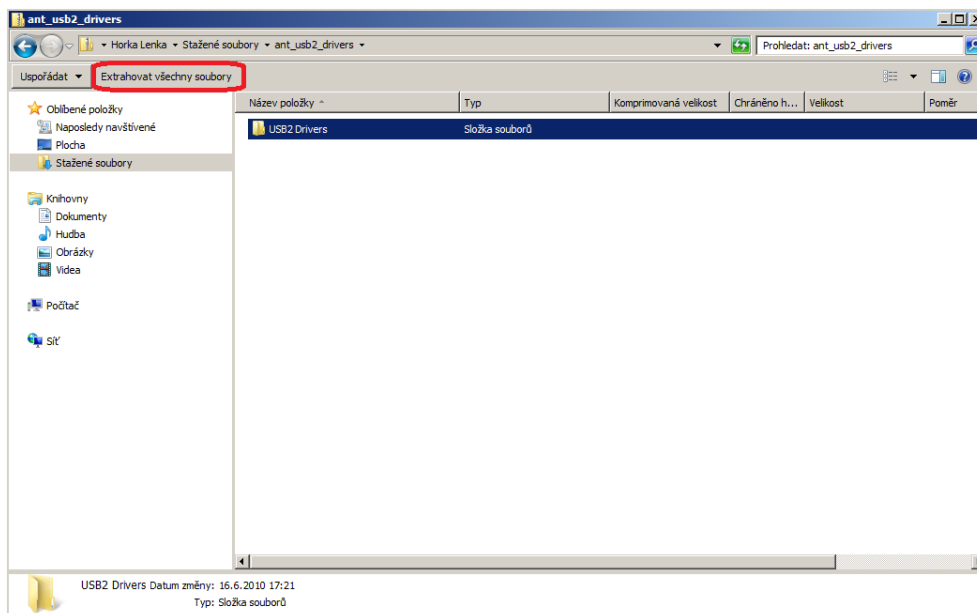

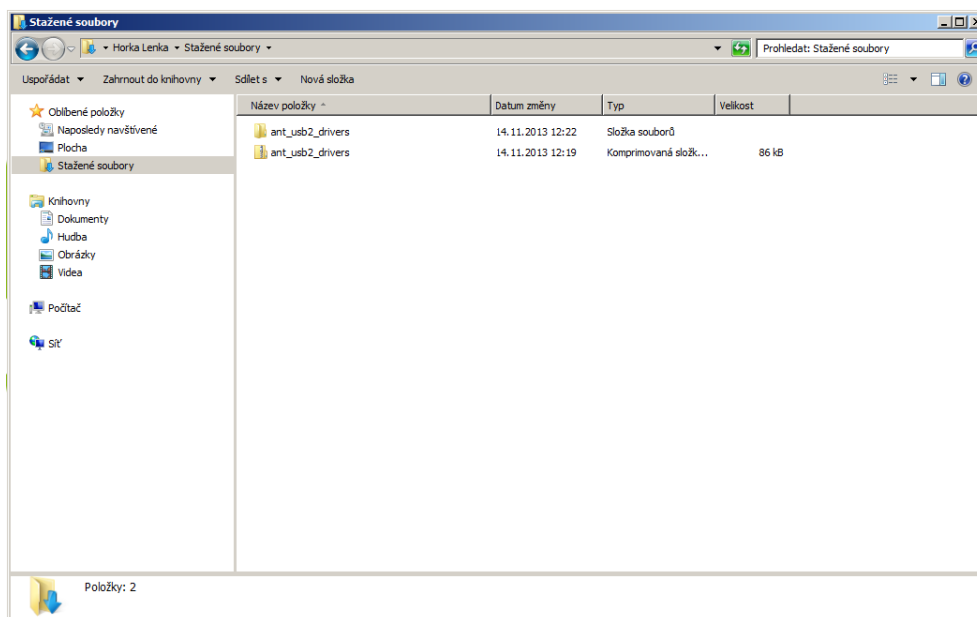


2. Instalace ovladačů:


Přes tlačítko „Start“ vyhledáme program „Správce zařízení“ (Správce zařízení je součástí Ovládacích panelů).


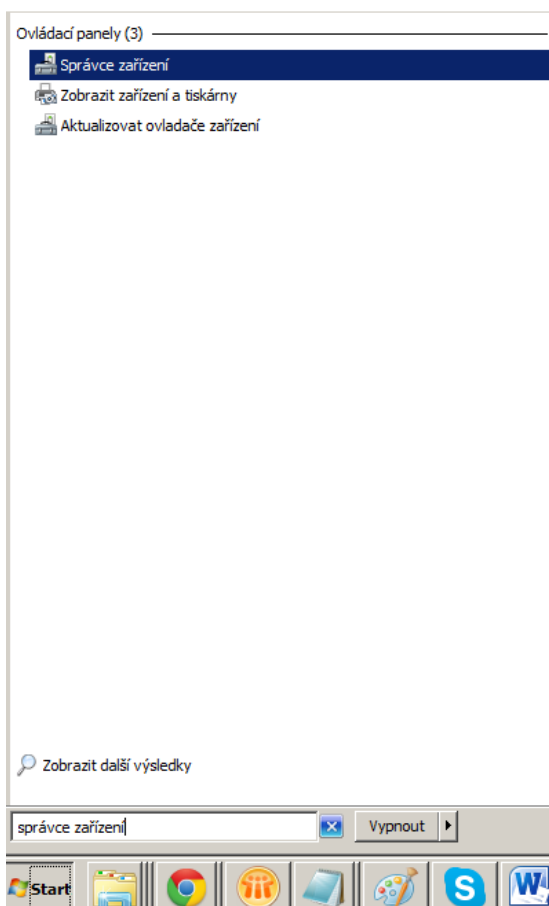



V programu „Správce zařízení“ se u položky „ANT USBStick2“ zobrazuje žlutý vykřičník. Zařízení chybí ovladače, které již máte stažené do počítače. Nyní je pouze nainstalujeme. Klikněte pravým tlačítkem na název zařízení a zvolte variantu „Aktualizovat software ovladače...“.

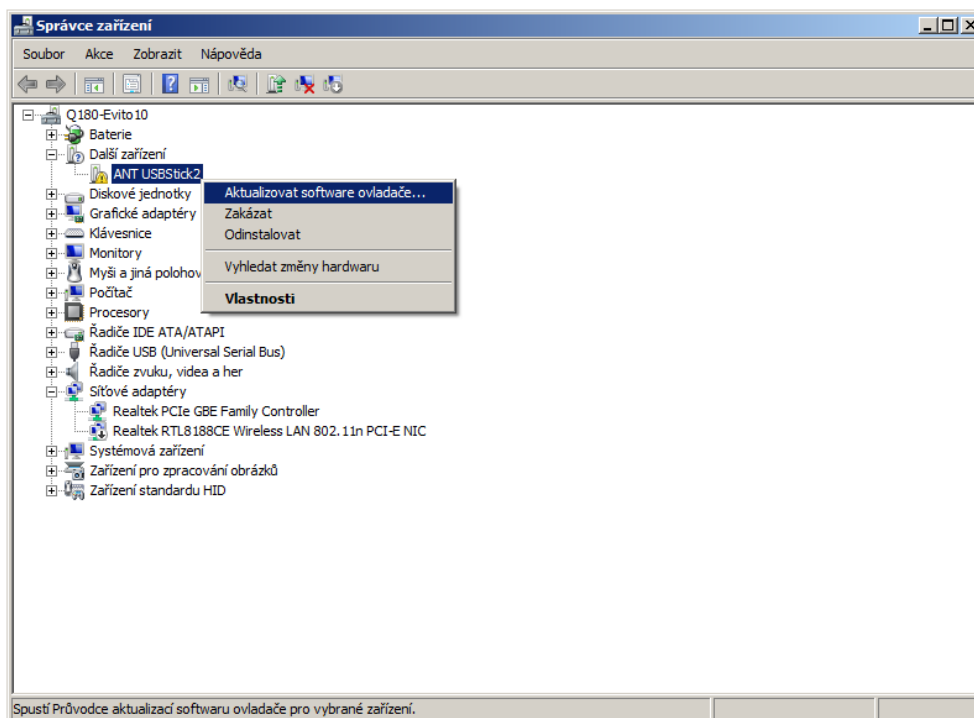


Zvolte umístění stažených ovladačů:

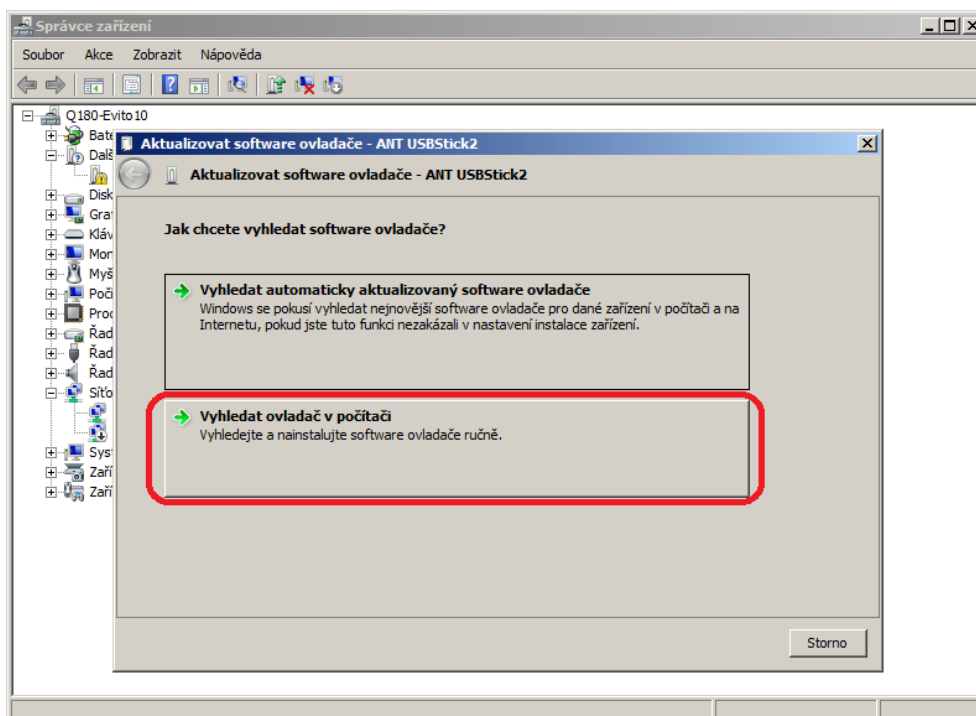

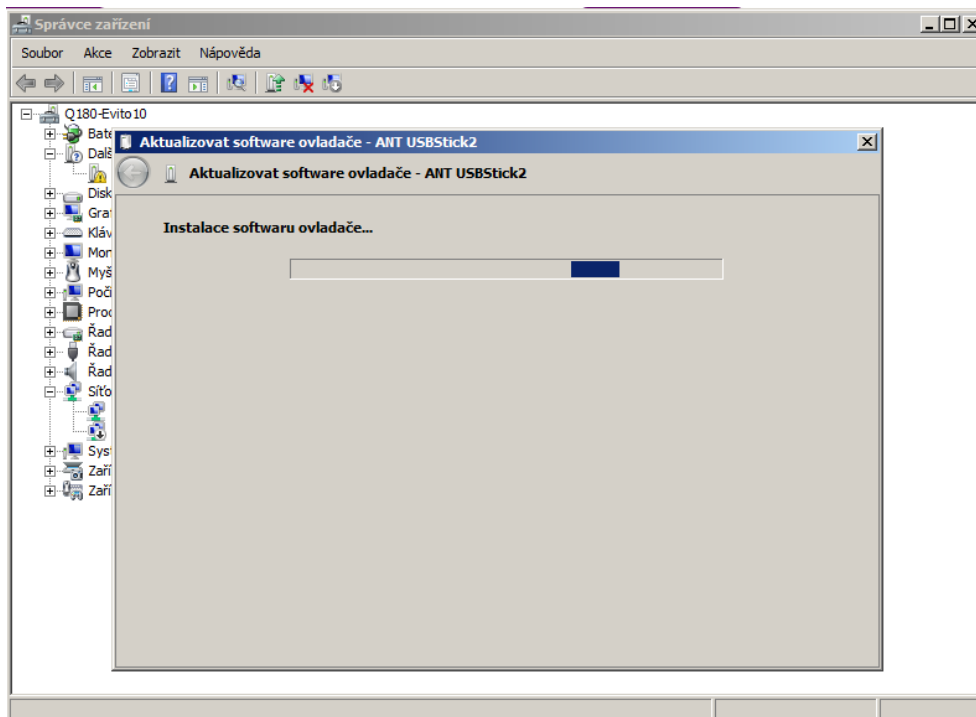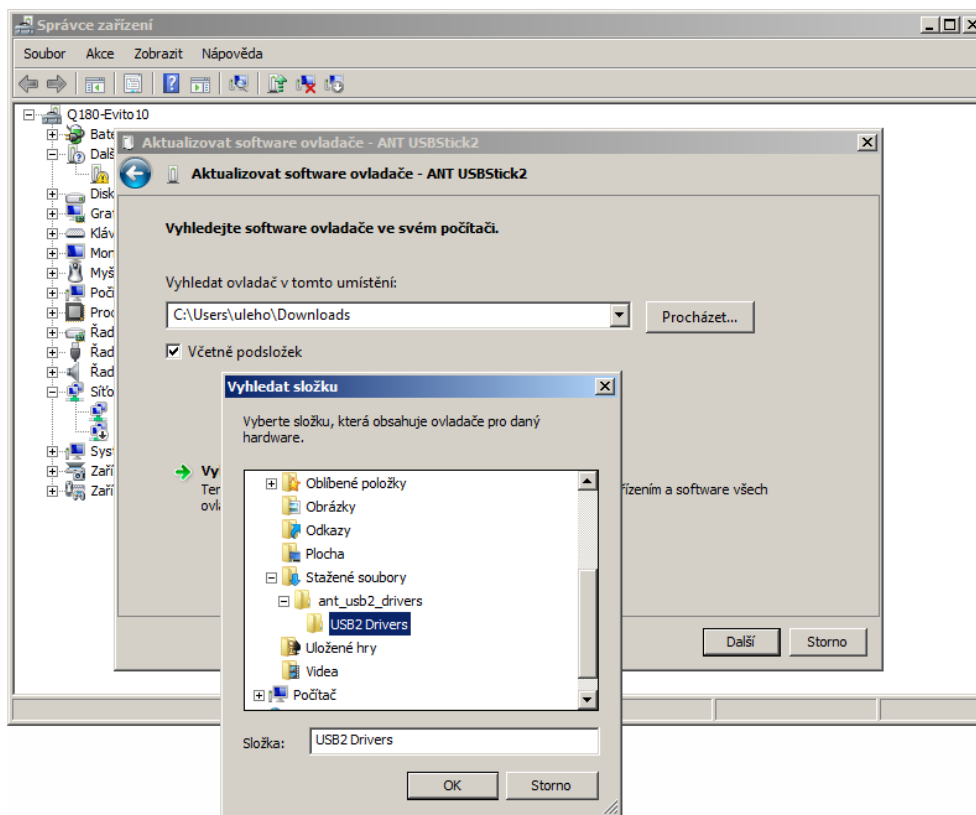

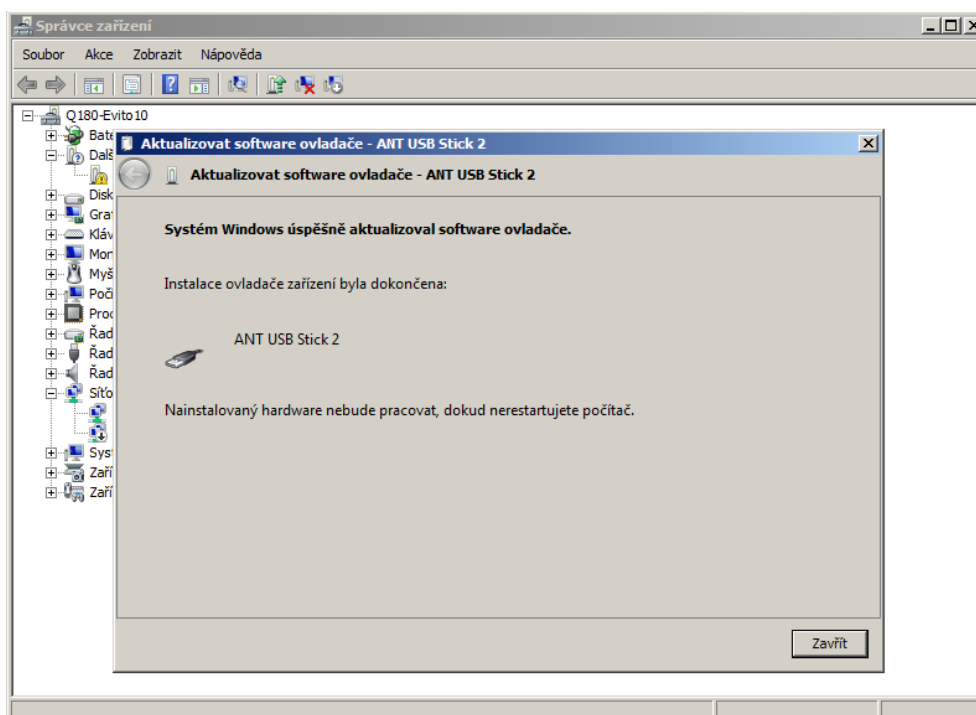

Nyní jsou ovladače úspěšně nainstalovány. Restartujte svůj počítač. Po restartu ověřte správné nainstalování ovladačů – v eVito Win Service se bude zobrazovat **zelená** ikona s textem „USB ANT+ připojeno“.

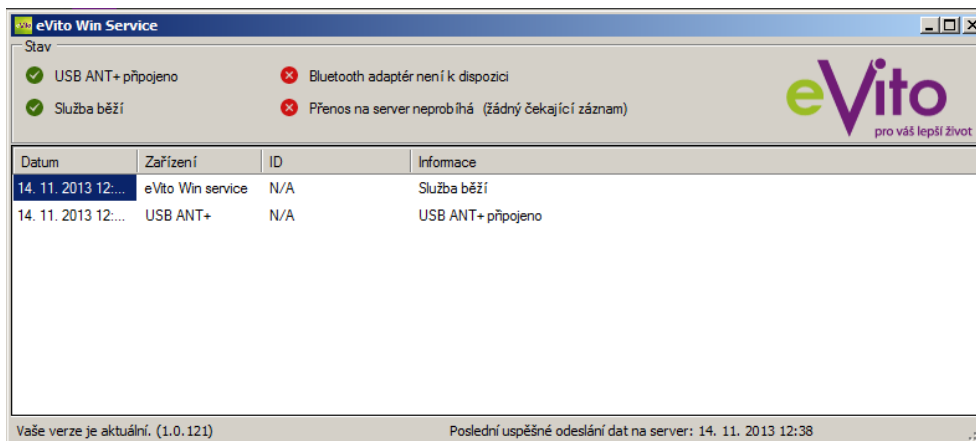

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na eVito podporu – podpora@evito.cz